


Ambu® Intubationstrainer

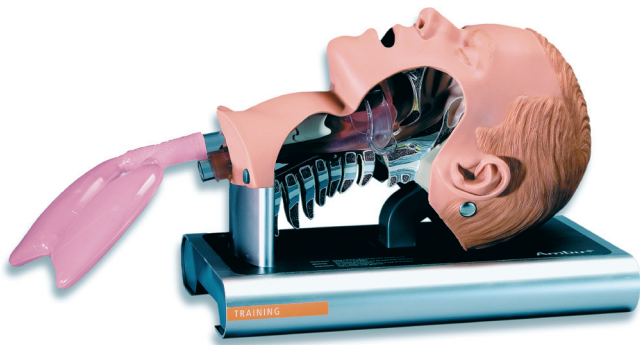

Die wichtigsten Vorteile

- Alle gängigen Intubationstechniken können trainiert werden
- Aktive Trainingsüberwachung durch die seitliche Öffnung
- Naturgetreuer anatomischer Aufbau
- Einfach zu reinigen

Ambu® Intubationstrainer

Der Ambu Intubationstrainer Erwachsene ist ideal für das Training des Atemwegsmanagements. Er verfügt über eine realitätsnahe und naturgetreue Anatomie, die durch eine seitliche Öffnung der linken Gesichtshälfte offen gelegt wird. So kann der Intubationsvorgang genau beobachtet und gegebenenfalls korrigiert werden. Die transparenten Wände des Pharynx und der Trachea gewährleisten zudem ideale Kontrollmöglichkeiten.

Einfacher Zugang zu den Atemwegen

Der Kopf lässt sich anheben und überstrecken. Das Schaumkissen dient der Unterpolsterung des Kopfes zur Herstellung der optimalen Ausgangsposition.

Esmarch'scher Handgriff

Der Esmarch'sche Handgriff lässt sich anatomisch korrekt ausführen.

Intubation

Der Ambu Intubationstrainer eignet sich für die Durchführung der nasalen und oralen Intubation mit unterschiedlichen Produkten wie ET- Tubus, Larynxmaske, Larynxtubus und Combitube. Darüber hinaus können Absaugetechniken von Mund und Rachenhöhle sowie der Trachea geübt werden.

Akustische Signale

Zahnalarm

Bei zu starkem Druck mit dem Laryngoskop auf die Schneidezähne wird ein akustisches Signal ausgelöst.

Magenalarm

Der Ösophagus ist durch einen Pfropfen mit eingebautem akustischen Tongeber verschlossen. Dieser wird bei fehlerhafter Intubation mit einem Trachealtubus im Ösophagus ausgelöst.

Ständer

Der aus leichtem Aluminium gefertigte Ständer ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet.

Schubladen

Es befinden sich am Ständer zwei praktische Schubladen für Zubehör: Laryngoskop, Tuben, Masken, Gleitgel, Bürste etc.

Spezifikationen

| Abmessungen (mit Transporttasche) | |
|-----------------------------------|----------|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 240 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Gewicht | ca. 5 kg |



Zahnalarm

Erhältliche Konfigurationen

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |
|---------------|--|
| 186 002 000 | Ambu Intubationstrainer für Erwachsene mit Tragetasche |



Ensmarch'scher Handgriff

Training

| Erlernbare Techniken | |
|--|--------------------|
| Endotracheale Intubation | |
| Nasotracheale Intubation | |
| Fiberoptische Intubation | |
| Positionierung der Larynxmaske | |
| Positionierung des SLIPA | |
| Positionierung des Oropharyngealtubus | |
| Positionierung des Nasopharyngealtubus | |
| Einführung von Absaugkathetern | |
| Einführung von nasogastrischen Sonden | |
| Einführung von Sauerstoffkathetern | |
| Verwendbare Tuben | Größe |
| Larynxmaske | Größe 3 und 4 |
| Endotrachealtubus | 8 mm I. D. |
| Nasotrachealtubus | 7 mm I. D. |
| Oropharyngealtubus | 7 mm I. D. (ch 30) |
| Nasopharyngealtubus | 6 mm I. D. (ch 26) |
| Absaugkatheter | 4 mm I. D. (ch 18) |
| Magensonde | max. 9 mm |
| Nasogastrische Sonden | max. 7 mm |



Schublade mit Füllung



Transporttasche

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 DK-2750 Ballerup
 Denmark
 Tel. +45 72 25 20 00
 Fax +45 72 25 20 50
 www.ambu.com

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 D-61231 Bad Nauheim
 Tel. 06032 9250-0
 Fax 06032 9250-200
 www.ambu.de

