

MW24

NEW



Entrenador de Colonoscopio 3D NKS

Representación tridimensional del colon, basada en estudios analíticos de los datos de Colonoscopia por TC


La estructura tridimensional del colon ofrece el entrenamiento de una variedad de técnicas como la prevención de formación de bucles, reducción de los mismos incluyendo técnicas de inserción que forman bucles intencionalmente.

Supervisión del Producto


Katuhisa Noda, MD, Clínica Noda–Genki
Takatoshi Kitada, MD, Clínica Kitada
Yasumoto Suzuki, MD, Clínica Matsushima

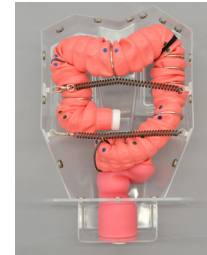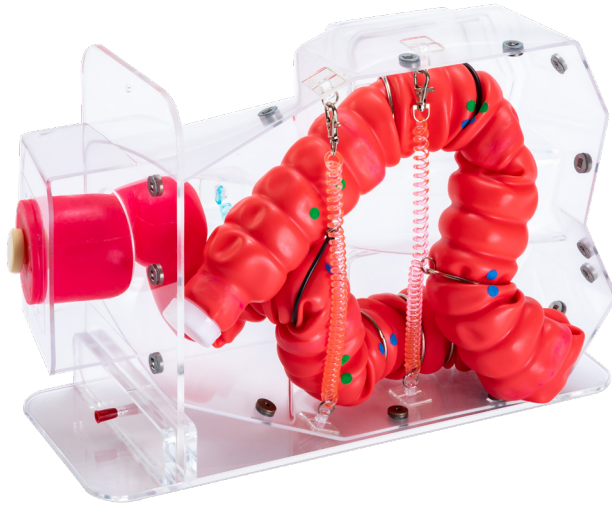

Bucle alfa corto

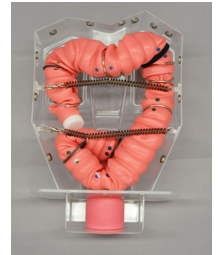

Bucle alfa largo

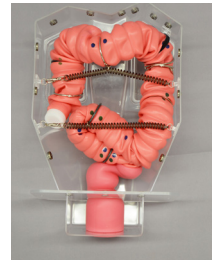

Bucle N

CARACTERÍSTICAS

- 1 | El cuerpo transparente permite una observación directa de la ubicación de la punta del colonoscopio dentro del colon.
- 2 | Anatomía rectal estable: el simulador está diseñado para adquirir las habilidades de colonoscopia que utilizan las tres válvulas de Houston como puntos de referencia, que aparecen en los mismos sitios siempre.
- 3 | El colon sigmoide se puede ajustar para tomar una de las tres morfologías más comunes. Los patrones se pueden cambiar rápidamente deslizando los puntos de fijación y moviendo el tubo del colon.
- 4 | El simulador es resistente al agua y se puede limpiar fácilmente con agua.
- 5 | Ligero y compacto, facilitando el manejo y transportación.

TECNICAS

- | Inserción de colonoscopio en tres patrones fundamentales:
 - Bucle alfa pequeño (método de pull)
 - Bucle alfa largo (método de push)
 - Bucle N (método de pull/push)
- | Inserción del colonoscopio en tres posiciones del paciente:
 - Lateral izquierdo
 - Lateral derecho
 - Supina
- | Compresión abdominal manual

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 43x28x16cm/ 17x11x6.3plgds.
Peso: 6kg/ 13.2lbs

MATERIALES

Resina blanda, resina dura
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

1 cuerpo transparente	1 colchoneta antideslizante
1 membrana abdominal	1 jarro plástico
1 base para cuerpo	15 lubricante
1 tubo de colon–recto	15 gel de colonoscopia
(con una tapa y tapón)	1 caja de almacenamiento
	1 manual de instrucción

REPUESTOS

11403–010
tubo de colon–recto con una tapa y tapón para MW24
11403–020
sachets de lubricante azules para MW24 (15x50ml)
11403–030
gel de colonoscopia para M24 (20ml each)

*El Endoscopio no está incluido.

